

Så använder du AeroBec[®] Autohaler[®]



Till dig som ordinerats detta läkemedel.

Varför AeroBec Autohaler?

Det här läkemedlet har ordinerats av din läkare, för att behandla din astma.

Det är viktigt att du följer de instruktioner och den dos som din läkare ordinerat även om du känner dig bättre. Hör av dig till din läkare eller sjuksköterska om du har frågor. Läs bipacksedeln i förpackningen eller på www.fass.se.

Autohaler skall inte användas tillsammans med en s.k. spacer (andningsbehållare).

Två testpuffar innan första användningen

Du behöver testa AeroBec Autohaler innan du använder den första gången eller om du inte har använt den på minst 2 veckor. Ta av locket och upprepa följande steg två gånger:

1. Dra upp spaken på ovansidan så den fastnar i upprätt läge.
2. Vänd inhalatorn så munstycket pekar bort från dig, knuffa sen på bottenplattan som sitter på inhalatorns undersida så att den avger en puff.
3. Fäll ner spaken på ovansidan.

Hur vet jag när AeroBec Autohaler är tom?

När du inte kan känna vätskan i inhalatorn när du skakar den lätt, eller om det inte kommer någon puff när du trycker av den med anordningen på undersidan, då är den tom.

Skötselråd

- Rengör munstycket med en ren, torr servett varje vecka. Tänk på att AeroBec Autohaler inte får spolvas under vatten.
- Använd före utgångsdatumet på förpackningen.
- Förvaras vid högst 30°C.
- Undvik hög värme som direkt solljus.
- Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller gammal medicin lämnas till apotek för omhändertagande.
- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Så här använder du AeroBec Autohaler

1



Ta av locket genom att dra i bakkanten.

2

Håll inhalatorn upprätt, dra i spaken på ovensidan så den fastnar i upprätt läge.



3

Andas ut ordentligt, slut sedan läpparna tätt kring munstycket och andas in djupt och långsamt.

Håll andan i 10 sekunder, andas sedan ut **sakta**.

Skölj munnen efteråt.



4

Fäll ner spaken på ovensidan och sätt på locket.



Var noga med att inte täcka för ventilöppningen på undersidan vid inhalation.

När spragen utlöses hörs ett "klick". Det är **viktigt** att du fortsätter andas in även efter det.

Om du ska ta fler inhalationer: Upprepa samtliga steg.

För mer information,
läs bipacksedeln i
förpackningen eller
på www.fass.se

Scanna QR-kod för instruktionsfilm på hur du använder AeroBec Autohaler



AeroBec® Autohaler® (beklametason). Inhalationsspray, lösning. Receptbelagt läkemedel. **Användning:** AeroBec Autohaler används vid astma. Den här typen av medicin används i förebyggande syfte och måste tas regelbundet, även när det inte finns några tecken på symtom. Full effekt förväntas först efter ca 10 dagars behandling. AeroBec Autohaler är inandningsstyrd och avger automatiskt rätt dos av medicinen vid inandning genom munnen.

Varningar och försiktighet: Tala med läkare eller sjuksköterska under tiden du använder AeroBec Autohaler om du: • upplever att effekten av AeroBec Autohaler försämras, t.ex. om du oftare får astmaattacker. Du kanske behöver ändra din läkemedelsbehandling. • har svåra infektioner eller inför ett kirurgiskt ingrepp. Din läkare kan överväga tillägg av kortisonpiller till din vanliga behandling under påfrestande perioder • upplever dimsyn eller andra synrubbingar. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. **Läs bipacksedeln noga.** AeroBec Autohaler tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg. Maj 2022.

Teva Sweden AB
Kungstorget 8 | Box 1070 | 251 10 Helsingborg
Tel 042 12 11 00 | www.teva.se | info@teva.se

